

# Manual de Instrucciones

## Nebulizador Vocal Vibes

Muchas gracias por adquirir tu Nebulizador Vocal Vibes.

Para asegurarte de darle el uso correcto, favor de leer el manual cuidadosamente antes de darle uso.

Favor de mantener el manual en un lugar de fácil acceso.

Las imagenes contenidas en el manual son ilustrativas.

### 1. NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El uso de este producto para niños y personas con necesidades especiales deben de ser supervisadas por un adulto.
- Limpia y desinfecta la taza salina y accesorios antes de usar y antes de guardar tu nebulizador.
- Exponer el nebulizador al agua puede dañar la batería. En caso que la batería haya sido sumergida en agua, no utilizar el dispositivo.
- El nebulizador Vocal Vibes es para ser utilizado SOLAMENTE con solución isotónica salina.
- El uso de otras sustancias podría dañar tu nebulizador. El uso de otro medicamento requiere la aprobación de un médico.

### 2. PRODUCTO


- Producto: Nebulizador Vocal Vibes
- Mecanismo y principio de funcionamiento:

El principio de funcionamiento del nebulizador vocal vibes se logra por la oscilación de malla micrometálica a través de la oscilación rápida del circuito y el chip transductor cerámico piezoeléctrico que envía el líquido a través de la malla metálica en partículas de tamaño diminuto (4  $\mu$ m). Su función forma inmediatamente numerosas partículas diminutas atomizadas para ser inhaladas a través de la máscara o boquilla para ingresar al sistema respiratorio del usuario. A través de esta inhalación nebulizada, la solución salina puede ser absorbida directamente por la boca, la garganta, la tráquea, la laringe, etc. del paciente, a través de la membrana mucosa del cuerpo para una hidratación completa y un tratamiento tópico.

#### Datos Técnicos del Nebulizador

- Frecuencia:108Hz
- Capacidad de la máquina (Maximum): 10ml
- Average Nebulization Rate: 0.4ml/min
- Tamaño de la partícula: 4~ micrometre(um)approx
- Dimensiones: D42mm\*H105mm
- Peso: 97g
- Batería: 3.7V 1400mA
- 2 modos de trabajo: vapor grande, vapor pequeño

## Contenido del producto

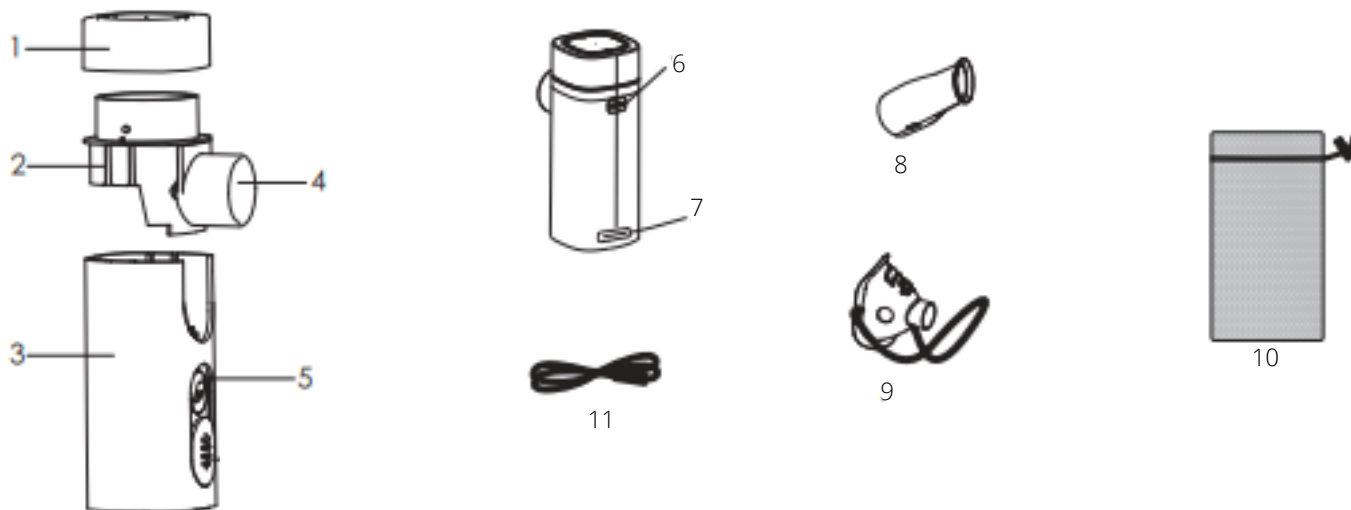

- 1. Tapa
- 2. Taza atomizadora
- 3. Unidad
- 4. Boquilla de pulverización
- 5. Botón de encendido

- 6. Botón para liberar taza salina
- 7. entrada mini USB para cargar
- 8. Boquilla
- 9. Mascarilla
- 10. Bolsa
- 11. Cable usb


### 3. COMO USAR TU NEBULIZADOR

- Este nebulizador es de uso personal solamente. Antes y después de utilizarlo favor de limpiar y desinfectar el nebulizador.

#### A) CARGAR LA BATERIA:

El nebulizador esta alimentado con batería de litio, la batería puede cargarse con cable usb to 5Vd.c. 1A No incluye el adaptador de corriente, favor de utilizar cualquier adaptador estándar. La batería dura aproximadamente 3 horas de uso continuo.


**Precaución: No utilizar el nebulizador mientras se está cargando.**

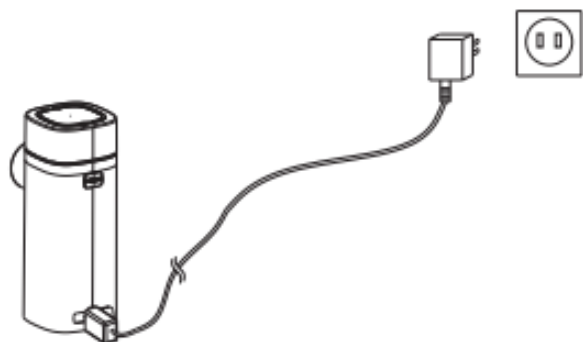

## B) ENSAMBLAR TU NEBULIZADOR


El nebulizador contiene dos mascarillas para adulto y niños, así como dos boquillas. Seleccione el accesorio que mejor se acomode a sus necesidades.

Conecte la boquilla o mascarilla como se indica a continuación:

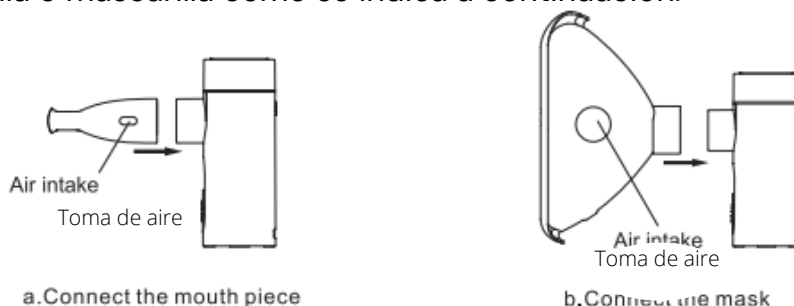

## C) USO

1. Limpie y desinfecte antes de utilizarlo.
2. Gire la tapa y coloque la solución alcalina en la taza de solución, luego cierre la tapa nuevamente.

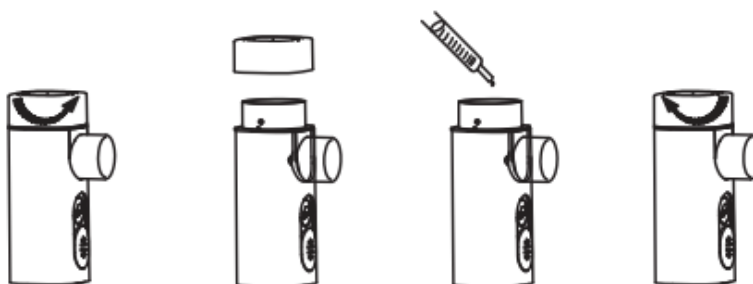

### 3. Nebulización

Presione el botón por 3 segundos, el indicador de luz se pondrá en azul y comenzará en modo de flujo de vapor grande. Si desea que funcione en un flujo de vapor más pequeño de click nuevamente en el botón.

4. Inhale hasta que la solución se termine. Presione el botón de encendido por 3 segundos, que comience la atomización y presione nuevamente por 2 segundos. Una luz verde-azul estará parpadeando, esto significa que el nebulizador está limpiando la malla.

5. Después de su uso remueva la boquilla o mascarilla. Sostenga el nebulizador y presione el botón de atrás para remover la taza de atomización. Abra la tapa y remueva todo el líquido restante, limpie y deje secar antes de guardar.

**Importante:** Después de cada uso limpie y seque correctamente cada pieza. NO guarde si hay líquido restante en la taza o mascarilla.

## D) LIMPIEZA

### 1. TAZA ATOMIZADORA

Abra la tapa y quite todo líquido restante

Vierta un poco de agua en la taza y cierre la tapa.

Presione el botón de encendido por 3 segundos, que comience la atomización y presione nuevamente por 2 segundos. Una luz verde-azul estará parpadeando, esto significa que el nebulizador está limpiando la malla.

Enjuague y limpie el exceso de agua y deje secar las partes antes de guardarlas.

### 2. UNIDAD DE NEBULIZACIÓN

Limpie con un trapito en caso de que existan residuos de líquido en la unidad.

### 3. MASCARILLA Y BOQUILLA

Enjuague con agua y limpie el exceso de agua con un trapo, deje secar antes de guardar.